

Provisorisches Kronen- und Brückenmaterial

Temdent

Ideal auch für Ihre
Implantatversorgung



Ihre Vorteile:

- ✓ Schnell, einfach und sicher in der Anwendung
- ✓ Individualisierbar
- ✓ Hohe Bruchfestigkeit
- ✓ Exakte Farbstabilität
- ✓ Kurze Aushärtezeit



E-Modul: 2.300 MPa
 Biegefestigkeit: 90 MPa
 Vickers-Härte: 140 MPa

Temdent Classic ist ein Pulver- / Flüssigkeitssystem, mit dem Sie provisorische Kronen und Brücken herstellen. Das System gibt Ihnen die Möglichkeit, in der direkten wie auch indirekten Technik zu arbeiten.

Art.-Nr.	Beschreibung
220010	Temdent Classic Set: 100 ml Flüssigkeit, 100 g Temdent Pulver hell, 100 g Temdent Pulver dunkel
220021	Temdent Classic Pulver 100 g hell
220022	Temdent Classic Pulver 100 g dunkel
220020	Temdent Classic Flüssigkeit 100 ml

Direkte Technik:

- Situationsabdruck**

Bevor der Zahn präpariert wird, wird eine Alginat- oder Silikon-Abformung (z. B. Trealgin, Resident, Schütz Dental) genommen und in der üblichen Weise gelagert.
- Anmischen**

Die Konsistenz sollte cremig-fließend bzw. teigähnlich sein. Dies entspricht einem Verhältnis von etwa 1,8 – 2,2 g Pulver auf 1 g Flüssigkeit (Mischungsverhältnis etwa 2:1).
- Blasenfreies Anrühren**

Verrühren des Temdent Pulvers und der Flüssigkeit zu einer cremiger Masse. Die Verarbeitungsbreite beträgt ca. 2 Minuten.
- Isolieren der Stümpfe**

Vor dem Applizieren der mit Temdent Classic gefüllten Abformung im Mund ist eine Isolation der präparierten Stümpfe (z. B. mit Vaseline) zu gewährleisten.
- Gefüllter Abdruck**

Jetzt applizieren Sie Temdent Classic mit der Abformung im Mund.
- Einsetzen**

Nach ca. 3,5 Minuten können Sie das Provisorium in der gummielastischen Phase entnehmen. Diese Maßnahme verhindert eine plötzliche Verbindung mit präparierten Zähnen.
- Polierte Brücke**

Fertiggestellte temporäre Brücke.

Bestellen Sie jetzt!
 Telefon: +49 (0) 6003 814-0
 Onlineshop: www.schuetz-dental.de

